



DAER

Dispositivo Antiatragantamiento
de Emergencia y Rescate

INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPOSITIVO

Última revisión: Enero 2026

Número de revisión: SAFER-2026-v1.1



SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE USO:

Este documento proporciona las instrucciones generales de uso para el funcionamiento del Dispositivo DAER. Es necesario, al adquirir el dispositivo revisarlo y confirmar que contiene todos los componentes y que se encuentra en buen estado. Lea las instrucciones de uso del manual y en caso de duda consulte con el responsable.

INDICACIONES DE USO:

El dispositivo DAER, es un dispositivo de último recurso que crea una presión negativa unidireccional (succión), que tiene como objetivo eliminar la obstrucción aguda de las vías aéreas que sufra la persona, y que le impida poder respirar.

Este dispositivo está fabricado con material de alta calidad y exento de sustancias tóxicas. Es portátil , y viene empaquetado en una bolsa para evitar que agentes externos lo puedan deteriorar.

El dispositivo debe ser utilizado sólo y exclusivamente para el uso especificado anteriormente.



ADVERTENCIAS

1. Durante todo el procedimiento de rescate, la cara del paciente debe mantener un sellado completo con la mascarilla sin fugas de aire.
2. El proceso de succión no debe exceder los tres segundos.
3. Lea atentamente el Manual del producto o cómprelo y utilícelo bajo la supervisión de personal médico.

Manufacturer's details

 Saferlife Products Co., Ltd
Edificio C3, Zona Industrial Gaosha,
Zhongcun, Panyu, Guangzhou,
511495, CHINA
Tel: +86-020-84599619
Correo electrónico: info@safelife.com.cn

Importer details

 RIOMAVIX S.L
CIF: B88249594
Calle Almansa, nº55
planta 1, puerta D.
28039, Madrid.

Details of the authorised representative

 Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse, 80, 20537,
Hamburg, Germany

Distributor details

 BS MEDICAL SPAIN S,L
CIF: B26926097
Avenida Sinforiano
Madroñero, 21, 1Pta , B8 1.
06011, Badajoz



DAER

Dispositivo Antiatragantamiento
de Emergencia y Rescate

INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPOSITIVO

① LLAMAR AL 112 E INICIAR MANIOBRA DE HEIMLICH

② COLOCAR

Apoyar la cabeza de la víctima sobre una superficie.
Colocar la mascarilla sobre la nariz y la boca de la víctima.

③ PRESIONAR

Presionar y mantener firmemente con la mano la mascarilla sobre la boca y la nariz de la víctima.

Esto permitirá que se genere una fuerte succión.

④ TIRAR

Tirar enérgicamente del mango del dispositivo, mientras la mascarilla queda fija sobre la cara de la víctima.

Si la obstrucción no se resuelve con el primer tirón, continúe empujando y tirando del mango del dispositivo sin retirar la mascarilla de la cara de la víctima hasta que se resuelva la obstrucción.

Este dispositivo se basa en un émbolo, que realiza una acción mecánica con el objetivo de crear una succión unidireccional.

La válvula del dispositivo es unidireccional para evitar lesiones adicionales y complicaciones.

El dispositivo está fabricado con material de alta calidad. Es portátil, viene empaquetado en una bolsa para evitar que agentes externos lo puedan deteriorar. Colocar en un lugar visible y accesible.

De un solo uso.



www.daer.es



[@dispositivodaer](https://www.instagram.com/@dispositivodaer)



630 90 25 42